

**snúza<sup>®</sup>**  
**HERO<sup>MD</sup>**

Udhëzues i shpejtë

# Faleminderit që zgjodhët



dhe që na lejuat të jemi pjesë e rrugëtimit tuaj  
prindëror.

Do të donim të shihnim një foto të vogëlushit tuaj teksa mban monitoruesin  
Snuza!

Ne do ta vlerësonim shumë mendimin dhe përvojën tuaj me pajisjen tonë, ndaj ju  
ftojmë ta ndani atë në platformat tona në rrjetet sociale, Amazon ose përmes  
[support@snuza.com](mailto:support@snuza.com).

Vlerësimet tuaja na ndihmojnë për të çuar edhe më tej punën tonë në  
promovimin e gjumit të sigurt për foshnjat në mbarë botën.

**E RËNDËSISHME:** Regjistroni monitorin tuaj Snuza për t'u siguruar se nuk është  
një pajisje e përdoruar më parë ose në pronësi të dikujt tjetër. Ndiqni udhëzimet  
në seksionin Garancioni të kësaj broshure.

The Snuza Family  
[www.snuza.com](http://www.snuza.com)

# 30 ditë garancion më shumë

**E RËNDËSISHME:** kërkohet prova e blerjes për të vërtetuar garancionin.

Ky monitor vjen me një garancion 2-vjeçar që fillon nga data e blerjes origjinale, e verifikuar me një faturë shitjeje. Ne do të zgjasim garancinë tuaj deri në 30 ditë kur ju regjistroni pajisjen tuaj brenda 7 ditëve nga data e blerjes.

## Ja se si të zgjasni garancinë tuaj:

1.

A. Regjistrohuni si përdorues në [snuza.com/register](https://snuza.com/register), ndiqni udhëzimet për regjistrim dhe evidentoni pajisjen tuaj, OSE

B. Nëse jeni të regjistruar tashmë, identifikohuni dhe skanoni kodin QR në këtë kartë, evidentoni pajisjen tuaj ose vizitoni linkun për më shumë informata [www.snuza.com/account/device/add/](https://www.snuza.com/account/device/add/).

2. Futni numrin serial të pajisjes tuaj dhe të dhënat e fëmijës suaj.

3. Ngarkoni dëshminë tuaj të blerjes dhe shkruani datën e blerjes dhe ruajeni.

## Për të marrë mbështetjen e produktit:

1. Log-in në [snuza.com](https://snuza.com).

2. Shkoni te "product's dashboard" dhe klikoni në numrin serial të pajisjes tuaj.

3. Klikoni në butonin "Get Support".

4. Futni kërkesën tuaj për mbështetjen e produktit, më pas klikoni butonin 'Send'.

5. Ne do të jemi në kontakt përmes email-it për të provuar dhe zgjidhur problemin tuaj.

6. Nëse ne nuk do jemi në gjendje ta zgjidhim problemin, atëherë procesi i kërkesës tuja për garancion bëhet i mundshëm.

7. Këtë mund ta bëni ose në pultin e produktit tuaj duke klikuar butonin "Report fault" ose përmes linkut që do merrni në email-in tuaj.



Nëse keni ndonjë koment ose pyetje, ju lutemi na kontaktoni përmes pultit të produktit tuaj duke klikuar butonin "Send a message" ose na dërgoni email në: [support@snuza.com](mailto:support@snuza.com).

Mirë se vini në familjen Snuza!  
Ekipi Snuza

# Hero udhëzime për Start-im

Skanoni **QR Code**, për të parë manualin e plotë të përdorimit.



**E rëndësishme:** Skanoni **QR Code**, për të parë videon e kalibrimit



Për support na kontaktoni përmes [support@snuza.com](mailto:support@snuza.com)

---

## 1. Përgatiteni pajisjen:

- 1.1 Ndizeni duke shtypur butonin 'ON/OFF'.
  - 1.2 Do të kryhet një testim start-up, i ndjekur nga treguesi i nivelit të baterisë me 3 bip.
  - 1.3 Do të dëgjoni një bip 2-tonësh me 2 LED të kuqe sinjalizues, që tregojnë se kërkohet kalibrimi. Vendoseni në një sipërfaqe të sheshtë, të palëvizshme për të kryer kalibrimin.
  - 1.4 Prisni për tonin e start-up dhe sinjalizuesin e gjelbër. HeroMD tani është gati për t'u vendosur në pelenën e foshnjës tuaj për monitorim. Skanoni kodin QR të mësipërm për të parë videon e Kalibrimit.
- 

## 2. Vendosja

- 2.1 Paloseni dyfish pjesën e sipërm të pelenës dhe sigurohuni që HeroMD të përshtatet mirë.
- 2.2 Vendoseni HeroMD drejtpërsdrejti në skajin e pelenës.
- 2.3 Sigurohuni që sensori i frymëmarrjes nga silikoni të jetë në kontakt të vazhdueshëm me barkun e fëmijës suaj.
- 2.4 **E RËNDËSISHME:** Sigurohuni që të mos pickoni lëkurën e bebit duke i vendosur butësisht gishtat tuaj në mes të lëkurës dhe kapëses.

### 3. Monitorimi

3.1 Kur detektohet frymëmarrja, drita treguese e gjelbërt fillon të pulësoj me çdo frymëmarrje.

3.2 Kur nuk detektohet frymëmarrje, drita treguese e alarmit do të pulsojë me ngjyrë të kuqe çdo 3 sekonda.

3.3 Nëse nuk detektohet asnjë frymëmarrje për 15 sekonda, HeroMD fillon të dridhet dhe të alerموj me një dritë të kuqe që pulson treguesin e frymëmarrjes. 3.4 Nëse frymëmarrja detektohet brenda 5 sekondave pas një dridhjeje, drita treguese e frymëmarrjes pulson e kuqe në çdo frymëmarrje pasuese për të treguar se ka pasur një dridhjeje më herët.

3.5 Pas tri dridhjeve, aktivizohet paralajmërimi i zgjimit (blic i kuq dhe bip çdo 2 sekonda). Kjo veçori mund të çaktivizohet. Shikoni seksionin 9.2 të manuali i përdorimit.

3.6 Nëse frymëmarrja nuk detektohet në periudhën prej 20 sekondash, do të bjerë alarmi i plotë zanor, duke paralajmëruar prindin/kujdestarin që të ndërhyjë shpejt.

3.7 Nëse ka më pak se 8 frymëmarrje në minutë, aktivizohet paralajmërimi i ritmit të frymëmarrjes - Drita treguese e frymëmarrjes pulson e verdhë me një bip të dëgjueshëm me dy ton në çdo sekondë. Kjo veçori mund të çaktivizohet. Shihni seksionin 9.3 të manualit të përdorimit.

3.8 Për të fikur, shtypni njëkohësisht butonat 'ON/OFF' dhe 'MODE/OFF'

---

### Masa paraprake:

- Për të shmangur pickimin e lëkurës së bebit, vendosni butësisht gishtat midis kapëses dhe lëkurën së bebit.
- Përdoreni HeroMD vetëm kur bebi fle në një shtrat statik. Pa lëvizje.
- Jo i përshtatshëm për të fjetur bashkë ose për të ndarë shtratin me bebin.
- Lëvizjet nga burime të jashtme, si p.sh. shtyrja në karrocë, udhëtimi me automjet ose avion, mund të zbulohet nga sensori i HeroMD.
- HeroMD nuk duhet të mbështetet aty ku ka burime të jashtme të lëvizjes.
- Ky monitorues i frymëmarrjes mund të mos jetë në gjendje të detektoj të gjitha ngjarjet rrezikshme për jetën.

???

Renuncia: Los clientes usan este monitor bajo su propio riesgo. Snuzza International (Pty) Ltd, sus miembros, empleados, agentes, contratistas, representantes, fabricantes, distribuidores y asociados ("SNUZA") no serán responsables de ninguna pérdida, daño o lesión sufrida por el cliente o cualquier otra persona derivada de, o en relación con el uso o el fabricante del monitor, incluida la pérdida, el daño o las lesiones sufridas por el cliente o cualquier otra persona como resultado de cualquier defecto con respecto al monitor, y todas las garantías y cualquier otra responsabilidad de cualquier tipo causa derivada, quedan excluidos de la presente. El cliente por este medio indemniza a Snuzza International (Pty) Ltd con respecto a dicha responsabilidad. Garantía: Snuzza International (Pty) Ltd garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 24 meses a partir de la fecha original de compra, verificado por un recibo de compra.

